

	SDIS 70 Guide des procédures opérationnelles PROTOCOLE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES VSAV ET DU PETIT MATERIEL	Fiche n° : 0047 MAJ 18 mars 2020 Validité : permanente
☒ Tous les personnels		
Références : - Fiche technique « SURFANIOS PREMIUM » - Recommandations Hygiène CCLIN		

1°) Matériel à utiliser

- **Utiliser systématiquement des gants**, le Surfanios® est particulièrement agressif sur la peau (eczéma, brûlures...).
- Respecter la dilution du produit Surfanios® :
« **1 dose diluée dans 8 litres d'eau froide** » (cf fiche technique « SURFANIOS PREMIUM »), stabilité 24 heures et à renouveler dès que souillée,
- Les éponges sont de véritables réserves de germes, elles sont donc à proscrire, ainsi que le balayage à sec qui met en suspension les particules,
- Utiliser des chiffons propres, non pelucheux, ou rouleaux de papier, imbibés de la solution préparée pour les surfaces et d'un balai à franges pour le sol,
- Chaque matin dans les CIP et après chaque retour d'intervention dans les CI :
Préparer, dans un récipient adapté au trempage des chiffons, une solution de Surfanios® selon la dilution de **1 dose pour 8 litres d'eau froide** (cf fiche technique « SURFANIOS PREMIUM ») et préparer également, selon la même dilution, le récipient servant au balayage humide

*Garder 1 litre de solution pour le nettoyage des locaux du centre
(À mettre dans un récipient prévu à cet effet et à identifier)*

- Chaque VSAV disposera d'une gourde et d'un rouleau de papier type mécanique. Ce matériel sera dédié à la désinfection des VSAV qui se pratiquera au CH (parois verticales, tablettes, matériel utilisé, habitacle...). Dans chaque CH sera mis à disposition un jerrycan de 20 litres avec du Surfanios® prêt à l'emploi, pour assurer le remplissage des gourdes. Les CIP assureront le remplacement chaque matin des jerrycans.
Nota : le nettoyage et la désinfection des sols sera effectué au centre.

2°) Périodicité des désinfections

➤ Désinfection « standard » du VSAV

(Pour toute mission SUAP)

↳ Nettoyer et désinfecter le matériel utilisé sur intervention, les surfaces en contact avec la victime (tablette inox, MID, brancard, poignées, la cabine...) avec la gourde et le rouleau de papier en dotation dans chaque VSAV.

Rappel : le nettoyage et la désinfection doit s'effectuer en tenue de protection « niveau 1 » au minimum ou « niveau 2 » s'ils sont encore équipés (En fonction des protocoles du CH).

A l'issue, l'ensemble des tenues hormis les lunettes seront laissées au CH « sac DASRI ».

(Les lunettes devront être mise dans un sac DASRI dans l'attente de la désinfection au CIS)

Nota : le nettoyage et la désinfection des sols seront effectués au centre et laisser les portes ouvertes (cellule et cabine) pendant 30 minutes minimum. Les lunettes seront désinfectées également au centre par trempage puis rinçage.

➤ **Désinfection intermédiaire du VSAV**

(Cellule + cabine) ⇒ **1 fois par semaine** dans les CIP et CI

⇒ Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces horizontales et verticales du VSAV, excepté l'intérieur des différents rangements ;

➤ **Désinfection complète du VSAV**

(Cellule + cabine) ⇒ **1 fois par mois** dans les CIP et CI

NETTOYAGE ET DESINFECTION du VSAV ou VSU

Étape 1 : Sortir le matériel utilisé de la cellule sanitaire au CH ou au CIS

Sortir le brancard et le petit matériel utilisé



Brancard

Petit matériel
utilisé (Sac SUAP,
O² ...)

Tenue de protection : EPI risques infectieux niveau 1 ou niveau 2 si pas retirés au CH

Désinfection du petit matériel après lavage et trempage si besoin

Trempage (au centre)

Eau froide + solution Surfanios®
Dilution habituelle
(cf fiche technique
« *SURFANIOS PREMIUM* »)



30 mn maxi et minimum



RINÇAGE à l'eau claire



SÉCHAGE

Essuyage humide (au CH)

se munir de la gourde,
la remplir à la jerrycane mise à disposition au CH,
utiliser le papier pour le nettoyage en l'imbibant
du produit Surfanios® à l'aide de la gourde



Laisser sécher, ne pas rincer

(Lingette = lingette jetable, chiffon propre, papier absorbant, essuie-main, lingette lavable)

Étape 2 : Désinfection de la cellule au CH ou au CIS

Désinfection
des surfaces
de travail



Nettoyage et désinfection
des parois
du haut vers le bas
du fond vers l'entrée

Laisser agir, ne pas rincer
afin de favoriser l'effet
rémanent de la solution

Procéder à une première désinfection de la cabine avant le retour par le conducteur

Tenue de protection : EPI risques infectieux niveau 1 ou niveau 2 si pas retirés au CH

Étape 3 : Désinfection de la cabine au centre

➤ Désinfecter le volant, le levier de vitesse et les poignées intérieures et extérieures,

Tenue de protection : TSI manches baissées avec gants

Étape 4 : Nettoyage des sols (cellule et cabine) au centre

Le nettoyage et la désinfection des sols seront effectué au centre et laisser les portes ouvertes pendant 30 minutes au minimum

Tenue de protection : TSI manches baissées avec gants avec masque FFP2

Étape 5 : Lavage extérieur au centre si besoin



NOTA : RESPECTER LA FICHE TECHNIQUE « SURFANIOS PREMIUM »